


FRÜHTEST SCHWANGERSCHAFTSTEST

für Sicherheit bereits 2-3 Tage vor der erwarteten Periode.


Der Frühtest Schwangerschaftstest ist ein zuverlässiger Schwangerschaftstest, der einfach zu handhaben und abzulesen ist. Bereits ca. 2-3 Tage vor der erwarteten Periode, kann er zu jeder Tages- und Nachtzeit angewendet werden. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam und vollständig durch bevor Sie den Test machen.

Der Teststab

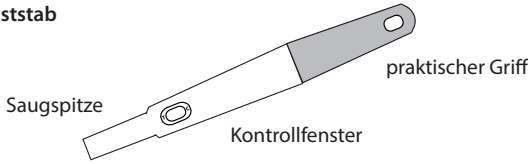

Anwendung des Tests

1. Nehmen Sie den Teststab aus der Verpackung. Stecken Sie die farbige Kappe auf das andere Ende des Teststabs.
2. Halten Sie den Teststab mit der Saugspitze nach unten und diese für mindestens 10 Sekunden in Ihren Urinstrahl.
3. Nehmen Sie die Kappe vom oberen Ende ab und setzen Sie sie wieder auf die Saugspitze. Legen Sie den Stab auf eine saubere und trockene Oberfläche.
4. Nach nur 1 Minute erscheinen Linien auf dem Kontrollfenster. Sie können das Ergebnis nach ca. 5 Minuten ablesen.

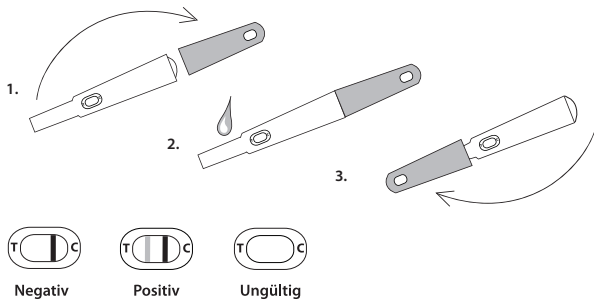


Wichtige Informationen:

Benutzen Sie den Test nicht nach Ablauf des Datums, welches auf der Packung aufgedruckt ist. Nicht innerlich anwenden, Schwangerschaftstest für die Durchführung zu Hause, nur in-vitro-Diagnose. Mit dem Haushaltsmüll entsorgen. Nicht benutzen, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Jeder Teststab kann nur einmal benutzt werden. Den Test sofort nach Öffnung der Verpackung durchführen. Hautkontakt vermeiden. Nicht einfrieren. Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

PZN -10043884

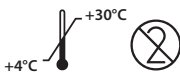

Hier finden Sie einige der am häufigsten gestellten Fragen zum Frühtest Schwangerschaftstest:

Wie zuverlässig ist der Frühtest Schwangerschaftstest?

Klinischen Studien zufolge liegt die Zuverlässigkeit bei über 99 %, wenn Sie den Test ab dem ersten Tag der fälligen Periode anwenden. Wird der Test bereits 2-3 Tage vor der zu erwartenden Periode angewendet, liegt die Zuverlässigkeit bei ca. 90 %. Werden dann 2 rosa Linien angezeigt (positiv/schwanger), ist das Ergebnis eindeutig. Wird nur eine rosa Linie angezeigt (negativ/nicht schwanger), sollte der Test am Tag der Fälligkeit der Periode wiederholt werden.

Wie funktioniert der Test?

Bei einer Schwangerschaft beginnt der Körper von Anfang an das Schwangerschaftshormon hCG zu produzieren (humanes Choriongonadotropin). Dieses ist im Verlauf der Schwangerschaft in steigenden Mengen im Urin nachweisbar. Der Frühtest Schwangerschaftstest kann sehr geringe Mengen von hCG ab 2-3 Tage vor der erwarteten Periode nachweisen.

Ab wann kann ich einen Test durchführen?

Der Frühtest Schwangerschaftstest ist ein schnell reagierender Test, den man zu jeder Tages- und Nachtzeit ab 2-3 Tage vor der erwarteten Periode anwenden kann. Man sollte jedoch in Betracht ziehen, dass eine starke Flüssigkeitsaufnahme das Schwangerschaftshormon verdünnen könnte und dass das Testergebnis dadurch schwieriger abzulesen ist.

Kann Alkoholkonsum das Testergebnis beeinflussen?

Nein.

Das Testergebnis ist negativ (nicht schwanger). Was jetzt?

Wenn nur eine Linie im Kontrollfenster erscheint, wurde das Schwangerschaftshormon nicht in Ihrem Urin gefunden und Sie sind wahrscheinlich nicht schwanger. Ihre Periode sollte zum erwarteten Termin einsetzen. Wenn dies nicht geschieht, sollten Sie noch einen Frühtest Schwangerschaftstest durchführen, da es sein könnte, dass Sie die Länge Ihres Zyklus falsch eingeschätzt haben, oder Ihr Urin zum Zeitpunkt der Durchführung des Tests nicht genügend hCG enthielt, um ein positives Ergebnis anzuzeigen. Wenn Sie den zweiten Test durchführen und kein hCG festgestellt wird und Ihre Periode trotzdem nicht innerhalb der nächsten paar Tage einsetzt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Das Testergebnis ist positiv (schwanger). Was sollte ich nun tun?

Denken Sie daran, dass kein Schwangerschaftstest, der zu Hause durchgeführt wird, die Diagnose eines Arztes ersetzen kann. Sie sollten sobald wie möglich einen Arzt aufsuchen und sich das Ergebnis bestätigen lassen und sich weiter beraten lassen.

Es sind gar keine Linien im Kontrollfenster aufgetaucht.

Was sollte ich nun tun?

Das Ergebnis sollte innerhalb von 5 Minuten angezeigt werden. Wenn jedoch nach 10 Minuten immer noch kein Ergebnis angezeigt wird, ist der Test ungültig. Der Grund dafür könnte sein, dass zu viel oder zu wenig Urin benutzt wurde. Sie sollten den Test mit einem neuen Stab wiederholen. Achten Sie auf die Anleitung auf der Vorderseite.

Wie lange bleibt das Ergebnis im Kontrollfenster stehen

(falls ich es jemandem zeigen will)?

Sie können das Ergebnis nahezu ewig aufbewahren, wenn Sie die Kappe vom Stäbchen ziehen und die Saugspitze vollkommen austrocknen lassen, bevor Sie das Stäbchen aufbewahren.

Der Frühtest Schwangerschaftstest kann hCG im Urin bei einer Konzentration größer als oder gleich 10 mIU/ml nachweisen.

Diese Gebrauchsinformation wurde im Juli 2017 überarbeitet.

Vertrieb:
VELAG-Pharma GmbH,
Arzneimittelvertrieb,
Holstenstraße 10,
D-24641 Sievershütten

Hersteller: Hubei MEIBAO
Biotechnology Co., Ltd.
No.5 Hongfu Road,
Shayang Economic Development Zone
448200 Jingmen City,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


EC REP Bevollmächtigter:
Shanghai International
Holding Corp. GmbH (Europe),
Eiffestrasse 80,
20537 Hamburg, Germany

FRÜHTEST SCHWANGERSCHAFTSTEST

Emniyet için beklenen reglden 2-3 gün önce.


Erken gebelik testi kolayca kullanılabilen ve okunabilen güvenilir bir gebelik testidir. Beklenen adet döneminden 2-3 gün önce gündüz ve gece fark etmeksizin her zaman kullanılabilir. Lütfen kullanım kılavuzunun tamamını testi uygulamadan önce dikkatli bir şekilde okuyun.

Test çubuğu

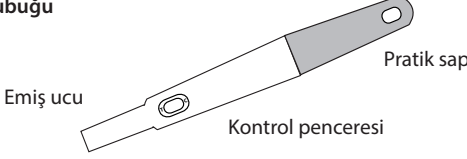

Testin uygulanması

1. Test çubuğunu ambalajından çıkarın. Renkli kapağını test çubuğunun diğer ucuna takın.
2. Test çubuğunu emiş ucu aşağıda olacak şekilde tutun ve bunu en az 10 saniye idrara maruz bırakın.
3. Üst uçtan kapağı alın ve tekrar emiş ucuna takın. Çubuğu temiz ve kuru bir yere koyun.
4. Sadece 1 dakika sonra kontrol penceresinde çizgiler belirmeye başlar. Sonucu yakl. 5 dakika sonra okuyabilirsiniz.

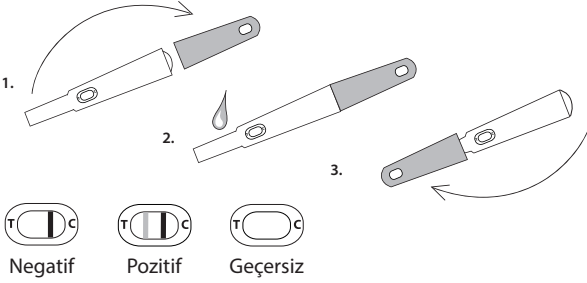


Önemli bilgiler:

Testi ambalajın üzerinde bulunan son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Dahilen kullanılmaz. Evde uygulamak için gebelik testi, sadece in-vitro teşhisi. Evsel atık olarak tasfiye edin. Folyo ambalajı hasarlı ise kullanmayın. Her test çubuğu bir defa kullanılabilir. Testi ambalajı açıldıktan sonra uygulayın. Ciltle temas etmesini önleyin. Dondurmayın. Oda sıcaklığında saklayın.

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

PZN -10043884

Gebe ve dünya tersine mi döndü?
Güç durumda gebeler için yardım telefonu
0800 - 40 40 020
schwanger-und-viele-fragen.de
Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik
Bakanlığının bir hizmetidir.

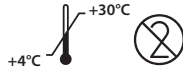

Burada erken gebelik testine ilişkin sıkça sorulan soruları bulabilirsiniz:

Erken gebelik testi ne kadar güvenilir?

Klinik araştırmalara göre testin zamanı gelen reglin ilk gününden itibaren kullanılması halinde güvenilirlik %99'un üzerindedir. Test beklenen reglden 2-3 gün önce uygulanırsa güvenilirlik yakl. %90 oranında olur. 2 pembe çizgi görüntülenirse (pozitif/gebe) sonuç açıktır. Tek bir pembe çizgi görüntülenirse (negatif/gebe değil) testin reglin ilk gününde tekrarlanması gerekir.

Test nasıl çalışır?

Gebelikte vücut ilk başından itibaren gebelik hormonu hCG (human karyonik gonodotropin) üretmeye başlar. Bu, gebelik sürecinde idrarda artan miktarlarda tespit edilebilir. Erken gebelik testi beklenen reglden 2-3 gün öncesinden itibaren çok düşük miktarda hCG içerebilir.

Testi ne zamandan itibaren uygulayabilirim?

Erken gebelik testi hızlı tepki veren bir testtir ve beklenen reglden 2-3 gün öncesinden itibaren gündüz veya gece her saatte uygulanabilir. Fakat aşırı sıvı tüketiminin gebelik hormonunu inceleyebileceği ve testin sonucunun okunmasını zorlaştırabileceğine dikkat edilmelidir.

Alkol tüketimi testin sonucuna etki edebilir mi?

Hayır.

Test sonucu negatif (gebe değil), şimdi ne olacak?

Kontrol penceresinde sadece bir çizgi varsa idrarınızda gebelik hormonu bulunmamıştır ve muhtemelen gebe değilsinizdir. Regliniz beklenen günde başlamalıdır. Eğer başlamazsa bir erken gebelik testi daha uygulamalısınız, çünkü reglinizin süresini yanlış tahmin etmiş olabilirsiniz veya testin uygulandığı sırada idrarınız pozitif bir sonucu göstermek için yeterli hCG miktarını içermemiş olabilir. İkinci testi yaptıysanız ve hCG tespit edilemediyse ve buna rağmen adet döneminiz birkaç gün içinde başlamadıysa bir doktora başvurulmalıdır.

Test sonucu pozitif (gebe), şimdi ne yapmalıyım?

Evde yapılan hiçbir gebelik testinin doktor teşhisinin yerine geçmeyeceğini unutmayın. Olabildiğince kısa süre içinde bir doktora gitmelisiniz ve sonucu onaylatmalı ve ayrıntılı bilgi almalısınız.

Kontrol penceresinde hiç çizgi belirmedi, şimdi ne yapmalıyım?

Sonuç yakl. 5 dakika içinde gösterilmelidir. 10 dakika sonra hala bir sonuç gösterilmezse test geçersizdir. Bunun nedeni çok fazla veya çok az idrar kullanılması olabilir. Testi yeni bir çubukla tekrarlamalısınız. Ön taraftaki kılavuza dikkat edin.

Sonuç kontrol penceresinde ne kadar kalır (birisine göstermek istersem)?

Çubuğu saklamadan önce çubuğun kapağını çıkartmanız ve emiş ucunu tamamen kurutmanız halinde sonucu istediğiniz kadar uzun süre saklayabilirsiniz.

Erken gebelik testi idrarda 10 mIU/ml veya üzerinde konsantrasyonda HCG içerebilir.

Bu kullanma talimatı Temmuz 2017 tarihinde revize edilmiştir.

Satış
VELAG-Pharma GmbH,
Arzneimittelvertrieb,
Holstenstraße 10,
D-24641 Sievershütten

Üretici: Hubei MEIBAO
Biotechnology Co., Ltd.
No.5 Hongfu Road,
Shayang Economic Development Zone
448200 Jingmen City,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC REP Yetkili temsilci:
Shanghai International
Holding Corp. GmbH (Europe),
Eiffestrasse 80,
20537 Hamburg, Germany